



IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP

Instrução de Uso 14 – Rev. 0

Manual de Instruções de Uso – Balão de Borracha Haoxi

Embalagem Individual em saco de polietileno acondicionado em caixa de papelão.

- ✓ PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
- ✓ INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
- ✓ A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:



Identificação do produto

Esta instrução de Uso se refere ao Balão de Borracha Haoxi e contém todas as informações necessárias para a correta utilização do produto. Produto não estéril bem como não é de uso único. Esterilizar antes do uso.

Princípio de Funcionamento:

O princípio de funcionamento do Balão de Borracha é promover a ventilação artificial, administrando gases anestésicos manualmente para o pulmão do paciente, durante o procedimento de anestesia.

Composição:

Látex Natural.
Disponíveis em 5 tamanhos.

Precauções:

- Não utilize de maneira alguma produtos químicos para limpeza do seu Balão.
- Não tente manusear o Balão de Borracha sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.
- Não fume no local onde está sendo utilizado o Balão.
- Conserve o seu produto em local seco, fresco e ventilado; não deixe-o exposto diretamente à luz do sol.
- Não o exponha à temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação dos itens de borracha.
- Nunca utilize óleo, graxa, hidrocarboneto ou quaisquer outros materiais orgânicos similares.

• No ato da esterilização, lembre-se que componentes de borracha não suportam temperaturas superiores a 40° C.

- Quando sai da cirurgia é lavado em água comum. É lavado com sabão ENZIMÁTICO. (marca RIOZYME).
- Enxaguar várias vezes com água destilado, secar bem. Após secar deixar 30 minutos imerso no GLUTARALDEÍDO 2%.
- Obs: Usar o Glutaraldeído puro. Após enxaguar várias vezes com água destilado. Deixar secar bem e aí estará pronto para uso novamente.
- Ou utilize também a esterilização em Óxido de Etileno.
- Verifique sempre as condições eventuais vazamentos, mau funcionamento, furos nos componentes de borracha.
- Não tente fazer qualquer reparo no seu Balão. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.
- Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não indicada pela Domax.
- A não observância destas condições será considerada mau uso do equipamento.

Instruções de Uso

A perfeita utilização deste equipamento depende do conhecimento dos corretos procedimentos de anestesia. O funcionamento do balão deve promover a ventilação artificial, administrando gases anestésicos manualmente para o pulmão do paciente, durante o procedimento de anestesia.

Armazenamento e Transporte

Deve ser armazenado em embalagem plástica, em local limpo e seco protegido de luz direta do sol e sob temperaturas entre -10°C a 30°C, e com umidade relativa inferior a 90% (não condensada) Para transporte são admitidas variação de temperatura de -10°C a 30°C, e com umidade relativa inferior a 75%.

✓ Manutenção:

Manutenção Preventiva de Rotina que deve ser realizada diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções neste manual. Em caso de quebra devem ser descartados e substituídos por um novo; O prazo de garantia de 90 dias após a data da nota fiscal de compra emitida. Declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o manual de instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela fábrica.

Tenha sempre em mãos o número do lote do produto.

✓ Atendimento ao Cliente:

Consulte a Domax sobre quaisquer dúvidas sobre funcionamento ou operação do produto, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários;

Registro ANVISA Adulto nº 81281830007 - Responsável técnica: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535
Registro ANVISA Infantil nº 81281830019 - Responsável técnica: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535

Fabricado por: Domax Ind. Com. Imp. E Exp. De Equip. Hospitalares Eirelli
CNPJ: 18.974.315/0001-03
Distribuído por: Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares
CNPJ: 05.678.146/0001-04
Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – Cep: 04727-040
Telefone: 55 (11) 5642-0587

