

D·MAX

IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP

Instrução de Uso 18 – Rev. 0

Manual de Instruções de Uso – Máscara Facial Haoxi

Embalagem Individual.

- ✓ PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
- ✓ INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
- ✓ A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:



✓ Indicação de Uso/Finalidade:

A máscara é utilizada nas atividades relacionadas a gasoterapia e oxigenação em geral, auxiliando na administração dos gases.

✓ Princípio de funcionamento:

A máscara se acomoda ao rosto do paciente permitindo a administração de gases.

✓ Modo de Uso do produto:

- Remova a máscara da embalagem e verifique se o elástico que prende a máscara à face está colocado.
- Para ajustar a pressão da máscara na face, puxe o elástico pela extremidade.

✓ Composição:

Máscara: Confeccionada em PVC atóxico – 65 shore A
Elástico: Confeccionado em Poliéster

✓ Advertências:

- Não utilize as máscaras sem prévio conhecimento;
 - Certifique-se de que o gás a ser utilizado é o indicado pelo médico. Não fume na área onde o equipamento é utilizado;
 - Mantenha as máscaras limpas e em bom estado de conservação, para isso utilize um pano limpo e macio umedecido em solução de água e sabão neutro, após a limpeza remova o resíduo com um pano umedecido em água;
 - Não utilize álcool, álcool isopropílico, Veja ou produtos similares para limpar as máscaras, estes produtos danificam as peças plásticas;
 - Após o uso, proceda a limpeza e desinfecção ou esterilização. Proceda a desinfecção e/ou esterilização antes de reutilizá-la, recomendamos que sejam seguidos os procedimentos de limpeza, desinfecção, esterilização e manutenção preventiva do hospital;
 - Não utilize o produto, caso haja fissuras ou rachaduras nas partes plásticas;
 - Não tente fazer qualquer reparo nas máscaras.
- A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas autorizadas e com peças originais. Em caso de mau funcionamento, suspenda o uso do produto e entre em contato com a Assistência Técnica.
- Só utilize este produto em perfeitas condições.
 - Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada.
- A não observância destas precauções será considerado uso indevido do produto.

✓ Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Manutenção preventiva:

A obediência às diretrizes hospitalares sobre higiene é de primordial importância. As instruções dos fornecedores de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, também devem ser seguidas no que tange à aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e etc. As máscaras devem ser limpas antes da desinfecção ou esterilização.

As partes externas das máscaras devem ser limpas com um pano limpo, macio e umedecido em solução germicida apropriada, tomando-se o cuidado para que os resíduos do produto de limpeza não se acumulem nas conexões das máscaras.

Após a limpeza, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco. Para a limpeza e desinfecção pode ser utilizado solução de Glutaraldeído 2% (Cidex) por 40 minutos. O enxágue deve ser executado com água destilada e esterilizada e, secar em ambiente seco.

Esterilização Utilizar Óxido de etileno: Utilizando óxido de etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados. Não utilize óleo, graxa ou qualquer substância baseada em hidrocarbono em nenhuma parte da máscara. Obs.: Não esterilizar em autoclave.

✓ Precauções:

Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de procedimentos médicos;

- Não utilize a máscara sem prévio conhecimento ou supervisão adequada;
- Certifique-se se a máscara é adequada e que está conectada corretamente;
- Após o uso, proceda a limpeza e a esterilização antes de reutilizá-la;
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo do calor e umidade;
- As máscaras não são fornecidas esterilizadas, portanto elas devem ser esterilizadas antes de seu uso.

✓ Armazenamento e Transporte:

Armazenamento: O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e protegido da luz solar. Não exponha o produto a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação das partes. Temperatura para armazenamento: 0° C a 45°C.

Transporte: O produto deve ser transportado em local fresco, seco e protegido da luz solar. Não exponha o produto a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação das partes. Temperatura para transporte: 0° C a 45°C.

✓ Manutenção:

Manutenção Preventiva de Rotina que deve ser realizada diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções neste manual. Em caso de quebra devem ser descartados e substituídos por um novo; O prazo de garantia de 365 dias após a data da nota fiscal de compra emitida desde que o produto analisado esteja em perfeitas condições para isso. Declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o manual de instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela fábrica.

✓ Atendimento ao Cliente:

Consulte a Domax sobre quaisquer dúvidas sobre funcionamento ou operação do produto, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários;

Registro ANVISA nº 81281830005 - Responsável técnico: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535

Fabricado por: Domax Ind. Com. Imp. E Exp. De Equip. Hospitalares Eirelli

CNPJ: 18.974.315/0001-03

Distribuído por: Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares

CNPJ: 05.678.146/0001-04

Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – Cep: 04727-040

Telefone: 55 (11) 5642-0587