

DOMAX

IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP

Instrução de Uso 12 – Rev. 0

Manual de Instruções de Uso – Sistema Baraka Borracha Haoxi

Embalagem Individual em saco de polietileno acondicionado em caixa de papelão.

- ✓ PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
- ✓ INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
- ✓ A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:



Identificação do produto

Esta instrução de Uso se refere ao Sistema Baraka Borracha Haoxi e contém todas as informações necessárias para a correta utilização do produto. Produto não estéril bem como não é de uso único. Esterilizar antes do uso.

Princípio de funcionamento:

O princípio de funcionamento do Sistema Baraka é promover a ventilação artificial, administrando gases anestésicos manualmente para o pulmão do paciente, durante o procedimento de anestesia.

Composição:

Adulto: Balão de Borracha, Máscara de Silicone, Conector e Válvula Unidirecional de policarbonato.
Infantil: Balão de Borracha, Máscara e Traquéia de Silicone, Conector de Policarbonato.

Precauções:

- Não utilize de maneira alguma produtos químicos para limpeza do seu Dispositivo de Anestesia.
- Não tente manusear o Dispositivo de anestesia sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.
- Não fume no local onde está sendo utilizado o seu Dispositivo de Anestesia.
- Conserve o seu Dispositivo de Anestesia em local seco, fresco e ventilado; não deixe-o exposto diretamente à luz do sol.
- Não exponha o seu Dispositivo de Anestesia à temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação dos itens de borracha.

- Nunca utilize óleo, graxa, hidrocarboneto ou quaisquer outros materiais orgânicos similares.
- **No ato da esterilização, lembre-se que os componentes de borracha e polivinil do seu Dispositivo de Anestesia, não suportam temperaturas superiores a 40o C.**

- Quando sai da cirurgia é lavado em água comum. É lavado com sabão ENZIMÁTICO. (Marca RIOZYME).

- Enxaguar várias vezes com água destilado, secar bem. Após secar deixar 30 minutos imerso no GLUTARALDEIDO 2%.

- Obs: Usar o Glutaraldeído puro. Após enxaguar várias vezes com água destilado. Deixar secar bem e aí estará pronto para uso novamente.

- Ou utilize também a esterilização em Óxido de Etileno.

Verifique sempre as condições de seu Dispositivo de Anestesia; eventuais vazamentos, mau funcionamento da válvula de segurança, furos nos componentes de borracha e polivinil. Caso seja constatada qualquer anormalidade nos contate imediatamente.

Não utilize o Dispositivo de Anestesia Adulto sem conhecer todos os procedimentos necessários para o seu uso.

- Não tente fazer qualquer reparo no Dispositivo de anestesia. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.

- Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não indicada pela Domax.

- A não observância destas condições será considerada mau uso do equipamento.

Instruções de Uso

A perfeita utilização deste equipamento depende do conhecimento dos corretos procedimentos de anestesia.

O Dispositivo de Anestesia é utilizado para ventilação espontânea e controlada Instruções de uso manualmente, e é um sistema de anestesia sem reinalação. Comumente é utilizado com o auxílio de um Rotâmetro ou Fluxômetro e um Vaporizador que irá liberar o halogenado (anestésico), e propiciar o processo de anestesia geral.

Armazenamento e transporte

Deve ser armazenado em embalagem plástica, em local limpo e seco protegido de luz direta do sol e sob temperaturas entre -10°C a 30°C, e com umidade relativa inferior a 90% (não condensada)

Para transporte são admitidas variação de temperatura de -10°C a 30°C, e com umidade relativa inferior a 75%.

Temperatura de trabalho -10°C a 30°C e deve ser manuseado e transportado com cuidado evitando amassar o tubo por sobrecargas, principalmente quando estiver fora da embalagem.

- ✓ Manutenção:

Manutenção Preventiva de Rotina que deve ser realizada diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções neste manual. Em caso de quebra devem ser descartados e substituídos por um novo;

O prazo de garantia de 90 dias após a data da nota fiscal de compra emitida desde que o produto analisado esteja em perfeitas condições para isso. Declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o manual de instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela fábrica. Tenha sempre em mãos o número do lote do produto.

- ✓ Atendimento ao Cliente:

Consulte a Domax sobre quaisquer dúvidas sobre funcionamento ou operação do produto, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários;

Registro ANVISA Adulto nº 81281830007 - Responsável técnica: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535

Registro ANVISA Infantil nº 81281830019 - Responsável técnica: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535

Fabricado por: Domax Ind. Com. Imp. E Exp. De Equip. Hospitalares Eirelli

CNPJ: 18.974.315/0001-03

Distribuído por: Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares

CNPJ: 05.678.146/0001-04

Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – Cep: 04727-040

Telefone: 55 (11) 5642-0587